


Sapphire


Přístroj pro permanentní make-up

Manuál

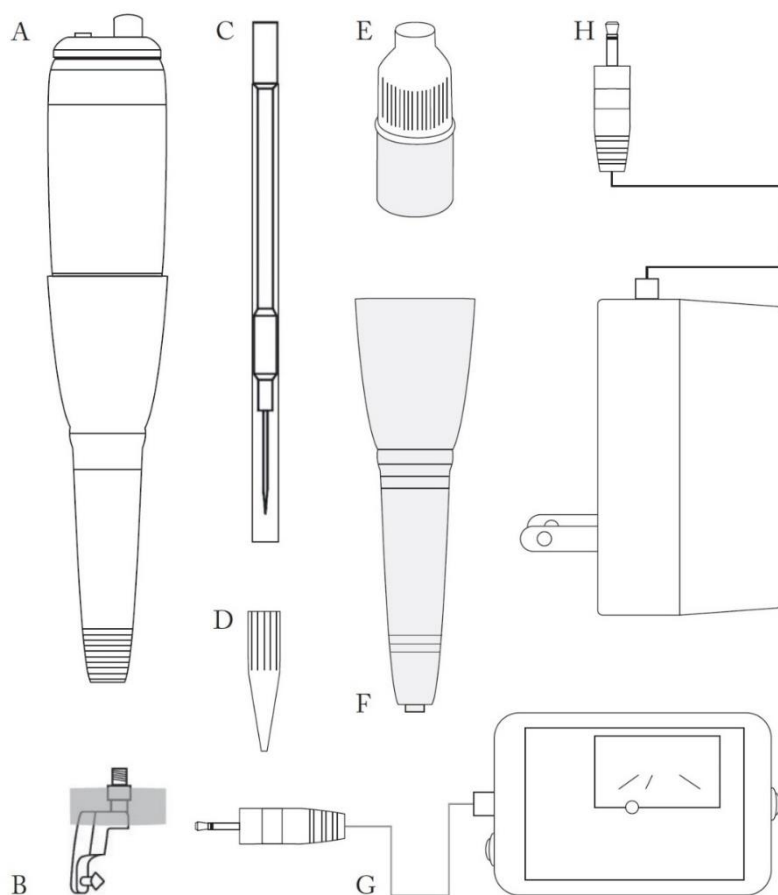

Obsah sady

- Sapphire přístroj
- Vyměnitelný coupler- plastový modul umožňující našroubování jehly do přístroje
- Jehla
- Špička
- Minerální olej (údržba přístroje)
- Jednorázové pouzdro přístroje
- Rychlostní adapter
- Univerzální adapter

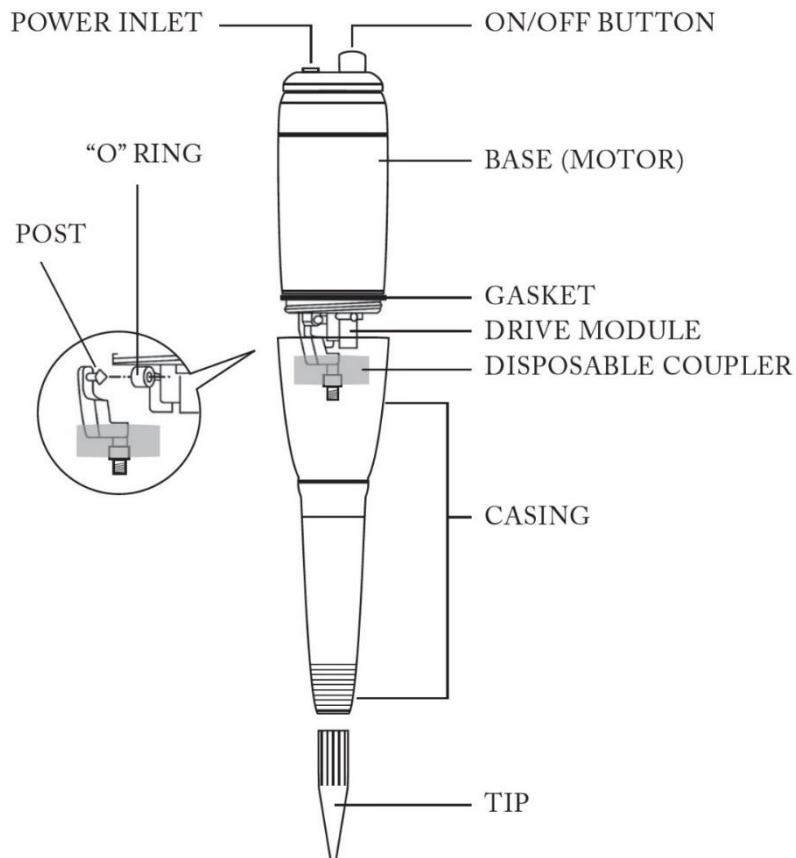

Příprava přístroje

- Odšroubujte horní část pouzdra přístroje (CASING).
- Našroubujte jehlu pevně na závit coupleru (DISPOSABLE COUPLER).
- Našroubujte horní část pouzdra (CASING) pevně k jeho základní části (BASE).
- Zasuňte špičku (TIP) horní části a upravte její zasunutí tak, aby jehla správně vyčnívala.
- Zapněte přístroj a zkontrolujte jeho hladký chod a správné vysunutí jehly.
- Po aplikaci permanentního make-upu odstraňte všechny části, které jsou určeny k jednorázovému použití, a přístroj vydesinfikujte.

Problémy

Přístroj nefunguje

Ověřte, zda je přístroj zapnutý

Zkuste jinou zásuvku

Ověřte, zda jsou elektrické kabely zapojeny správně

Zkontrolujte funkčnost adapter a nastavení správné rychlosti

Ověřte, zda nedošlo ke zlomení elektrického kabelu v místech zlomu

Jehla nevibruje

Zkontrolujte, zda je jehla správně našroubovaná

Vyměňte jehlu za jinou

Přístroj se zhřívá:

Zkontrolujte rychlost











Určení

Přístroj Sapphire je určen:

- pro profesionální použití
- pouze pro účely permanentního make-upu, mikropigmentace
- Firma MEI-CHA ani distributoři této firmy neodpovídají za škody popřípadě zranění způsobené přímo či nepřímo použitím tohoto přístroje.

Záruka

Záruka na tento přístroj se řídí podle Občanského zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb.

Typ	Velikost	Konfigurace	Barva
NANO	0,2 mm		Běžová
1-bodová	0,3 mm		Červená
2-bodová	0,3 mm		Fialová
3-bodová	0,3 mm		Zelená
4-bodová plochá	0,4 mm		Žlutá
5-bodová	0,3 mm		Modrá
6-bodová plochá	0,4 mm		Zlatá
8-bodová	0,3 mm		Hnědá
9-magnum	0,3 mm		Světle zelená
11-magnum	0,3 mm		Světle modrá

NANO - ideální pro ultra jemnou vláskovou kresbu

1-bodová jehla - pro vláskovou kresbu, znaménka, kresbu řas a jemné detaily

2-bodová - určená pro kontury rtů a očí

3-bodová - kontury rtů a očí, pudrový efekt obočí

4-bodová plochá – vhodná pro stínově vláskový efekt obočí a rozšíření kontur rtů

5-bodová – všestranně stínovací jehla (tzv. Round shader, RS) pro pudrový efekt obočí, stínování rtů a kamufláže

6-bodová plochá – stínovací jehla (tzv. Flat shader, FS) pro obočí, pigmentace prsních dvorců a výplň rtů

8-bodová – stínovací jehla (tzv. Round shader, RS) doporučená pro výrazné kontury rtů nebo očí

9-magnum – jemné obočí, stínování rtů, prsní dvorce a kamufláže

11-magnum – jemné obočí, stínování rtů, prsní dvorce a kamufláže

Navrhované použití jehel je předmětem kvalifikovaného posouzení kosmetičky (techničky), která úkon provádí.

MEI·CHA

MEI-CHA.COM